



icare

tonometer VET

new method
no anesthetic
rapid and accurate

トノベット手持眼圧計 TV01

トノベットは、アイケアフィンランド社により開発された、
小動物専用の手持眼圧計です。



トノベット手持眼圧計

TV01

- トノベット本体に測定用プローブを挿入し電源を入れると自動的に測定モードになります。面倒なキャリブレーションは不要です。
- プローブは清潔に個包装されたディスポーザブルタイプ。感染症や微生物汚染の心配がありません。角膜への接触もソフトで点眼麻酔の必要はありません。
- プローブと角膜との距離を数ミリ離れた位置でトノベットを保持します。測定ボタンを押すとプローブは前方に移動し角膜に接触して眼圧測定を行います。この操作を6回繰り返すことで正確な測定値が表示されます。この間わずか3~4秒。再現性の高い測定が可能です。



使用方法

- ① トノベット本体に測定用プローブを装填し電源を入れます。
- ② プローブ先端と角膜との距離を数ミリ離れた位置でトノベットを保持します。
- ③ 測定ボタンを押すとプローブが前後に移動し角膜にソフトに接触して値を表示します。
- ④ ③を6回繰り返すと最終結果が表示されます。

仕様

寸法：13~32mm(W)×45~80mm(H)×230mm(L)
重量：約250g(電池込み)
電源：単三電池 4本
測定範囲：1~99mmHg
電撃に対する保護の程度：B形機器
動物用医療機器承認番号：農林水産省指令18消安第4411号
製造業者：アイケア フィンランド社 (ICARE FINLAND OY)

参考文献：

Comparison of the use of new handheld tonometers and established applanation tonometers in dogs and horses
AJVR, Vol 67, No. 1, January 2006

Evaluation of a rebound tonometer for measuring intraocular pressure in dogs and horses
JAVMA, Vol 227, No. 2, July 15, 2006

トノラボ手持眼圧計

TV02

トノラボは、マウス・ラット専用の手持眼圧計です。



株式会社メディカルスペース

TEL 048-972-5890

icare
tonometer LAB