

バリ奥斯 370 Lux / バリ奥斯 370

Varios 370 ライト付 ライト無し iPiezo engine® マルチタスク 超音波システム

高機能を閉じ込めたコンパクトボディ

特長 — バリ奥斯370

- 取付け場所を選ばないコンパクトボディ
- 感覚的に使える操作パネル
- 操作がスムーズなパワー調節つまみと水量調節つまみ
- オートクレープ滅菌、熱水洗浄対応ハンドピース

仕様

- 電源: AC 100 V 50/60 Hz
- 発振周波数: 28~32 kHz
- 最大出力: 11 W(Gモード時)
- ユニット寸法: W 80 × D 115 × H 32 mm
(つまみとコード除く)
- ユニット重量: 430 g(ハンドピース除く)



バリ奥斯370 ライト付

バリ奥斯 370 動物セット

ライト付 バリ奥斯 370 Lux 動物セット

製品名 VA370 Lux 動物セット 製品番号 Y1002617

ライト無し バリ奥斯 370 動物セット

製品名 VA370 動物セット 製品番号 Y1002619

セット内容

- コントロールユニット(ハンドピースコード付)
- バリ奥斯370/370Lux ACアダプター
- ハンドピース
- コントロールユニットホルダー
- スケーリング用チップ 2本(G11, G13)
- 歯根膜剥離用チップ 1本(G90)
- ハンドピースホルダー
- フットコントロール(FC-70)
- 水フィルターセット
- チップ交換レンチ(CR-10)
- 他付属品

オプション品



製品名 水道コネクタ 製品番号 Z255021
● φ 14~20 mmの蛇口に適合



製品名 給水タンク 製品番号 Z255011
● 容量: 2.5 L ● 全長: 約37.5 cm

■ バリ奥斯370 / 370Lux 動物セットには水道コネクタ、給水タンクは含まれておりませんので、別途ご注文ください。

Varios tip

バリオス動物用チップラインナップ

歯根膜剥離

G90 スタンダード

標準付属



製品名 G90 製品番号 Z217700
使用最大パワー G 6

G90S ショート

オプション



製品名 G90S 製品番号 Z217701
使用最大パワー G 6

歯根膜剥離チップは、抜歯時の顎骨折や破折等のリスクを大幅に軽減。チップの形状を細く、且つエッジの両側面を鋭くすることで、術部へのアクセス性を高め、繊細な操作が求められる難抜歯においても安全な施術をサポートします。



重度の歯槽骨吸収のある歯
薄くなった下顎骨の医原性骨折のリスクを軽減し安全に抜歯することが可能



骨性癒着歯
歯槽骨の過剰な組織破壊を軽減でき、骨性癒着部位を平滑に剥離することが可能




下顎犬歯残根歯
残根周囲歯槽骨を過剰に切削することなく歯槽骨形態の保持が可能

切削・形成用

G61D


オプション

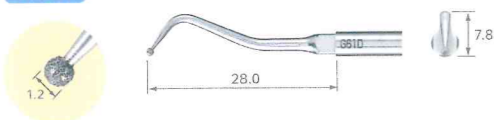

製品名 G61D 製品番号 Z217601
使用最大パワー G 2

G62D

オプション

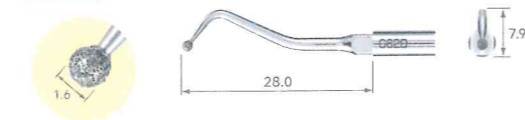

製品名 G62D 製品番号 Z217602
使用最大パワー G 2

ダイヤモンドコーティングされたチップは、抜歯後の骨棘平滑化及び不良肉芽の掻扱に最適。回転切削と比べ、低侵襲で骨切削でき、軟組織を損傷するリスクも軽減します。



ダイヤモンドチップ(G61DもしくはG62D)を装着し、十分な注水下で抜歯後の歯槽骨縁の骨棘を平滑化。



抜歯した全ての歯槽骨縁の骨棘をダイヤモンドチップで平滑にし、同時に不良肉芽の掻扱を実施。



歯槽骨縁の平滑後、吸収性縫合糸で歯肉同士を縫合して終了。

G 6 : 左記の記号と数値は、各チップにおける使用最大パワーモードと数値を示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

■必ず十分な注水下で行ってください。上記以外にもオプションとして各種チップを取り揃えております。

スクーリング

G11 最も使用頻度の高い標準的なチップです。犬のスクーリング全般にお使いいただけます。

標準付属



製品名 G11 製品番号 Z217411
使用最大パワー G 6



上顎前歯の例

G13 先端が細くなっていますので、前歯などの比較的小さな部位、または小型犬や猫のスクーリングに適しています。

標準付属



製品名 G13 製品番号 Z217413
使用最大パワー G 6



上顎白歯の例

G2 歯肉縁上に付着した大量の歯石除去に適したチップです。平らな断面を歯石にあて、歯面の形状にあわせて動かします。

オプション



製品名 G2 製品番号 Z217102
使用最大パワー G 7

G3 先端が丸い形状になっていて、歯肉縁上に付着した大量の歯石除去に適したチップです。

オプション



製品名 G3 製品番号 Z217103
使用最大パワー G 7

ペリオ

P10 シャープエッジタイプのチップで、ポケット内へのアクセスがスムーズに行なえ、全顎的に使用できます。硬い歯石の除去などに効果的なチップです。

オプション



製品名 P10 製品番号 Z217410
使用最大パワー P 10



上顎前歯の例



上顎前歯の例

尿道結石用

E50 尿道結石用チップは、尿道内の結石を超音波振動で破砕する細くて挿入がスムーズなチップです。

オプション



製品名 E50 製品番号 Z217050
パワーレンジ P Min~Max
パワーレンジ E Min~Max

＜尿道結石用チップ使用に際しての注意＞

●尿道結石用チップE50は、低い出力(モード設定キー **P** または **E**)からお使い下さい。高い出力だと粘膜を傷つける恐れがあります。



【チップの使用に際しての注意】

- 必ず添付文書および取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- チップのパワー設定は目的や症例に合わせて、各チップに適したモードとパワー数値でご使用ください。
- 各モードのパワーレベルについてはパワーモード比較表をご覧下さい。
- 口腔内の状態や症例、歯石の沈着量を確認しながら低いモード・パワーから使用し状態に応じてモード・パワーを上げて行くことをお勧めいたします。
- チップは振動により発熱しますので、目的や症例によっては十分な注水下でご使用ください。

指定されたパワー以下で使用した場合でも、使い方によっては破折することがあります。